

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit


(immuno-fluorescence)

Mit doppelte Anwendung in 1 für:

- Serum
- Nasopharyngeal Extrakt (Swab)



the fast lane to the European IVD market

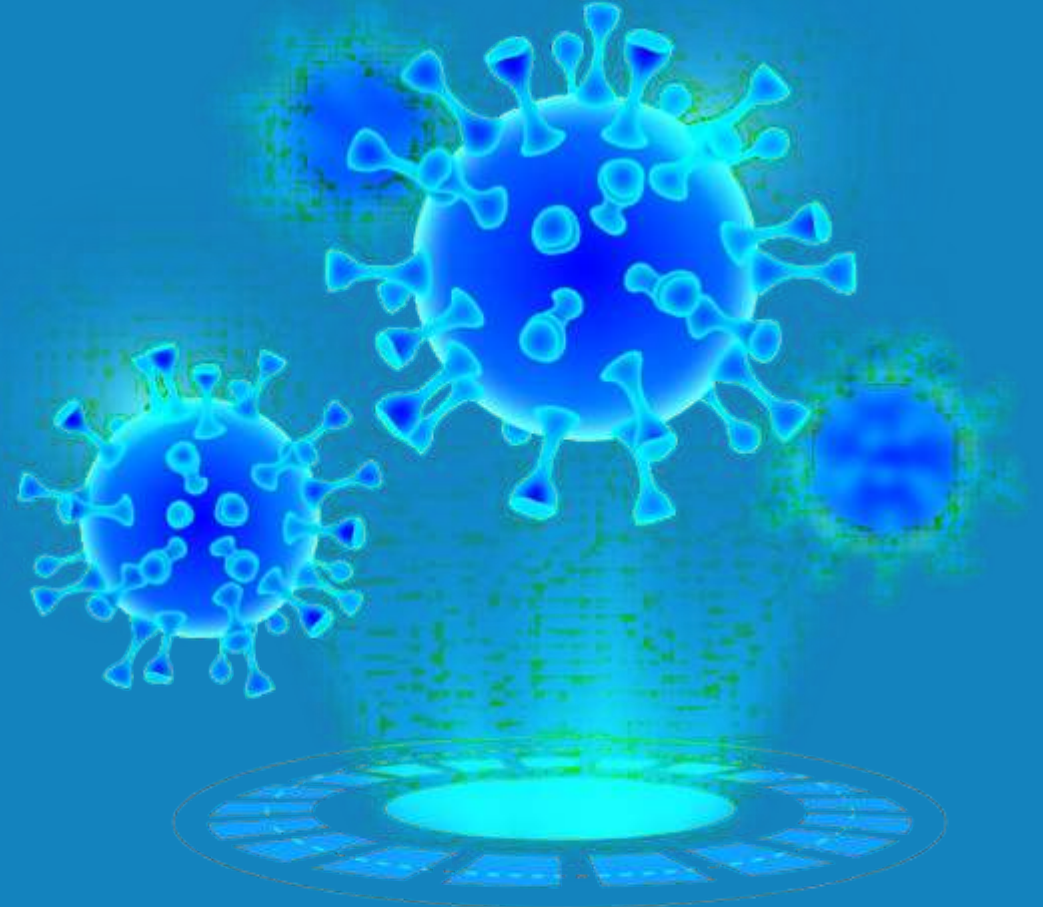



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Mit Anwendung für:

- Serum
- Nasopharyngeal Extrakt (Swab)



The SARS-CoV- 2 Antigen Rapid Test Kit

Der Kit enthält alle Materialien für die
Nasopharyngeal Probeentnahme

- Sterile Tupfer (swabs)
- Pipetten
- Filterkappen
- Puffer-Fläschchen
- Test-Kassetten




The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Der Kit enthält alle Materialien für die
Nasopharyngeal Probeentnahme

Kit Inhalt:

- 25 Sterile Tupfer (swabs)
- 25 Pipetten
- 25 Filterkappen
- 2 Puffer-Fläschchen
- 25 Test-Kassetten
- 1 Bedienungsanleitung

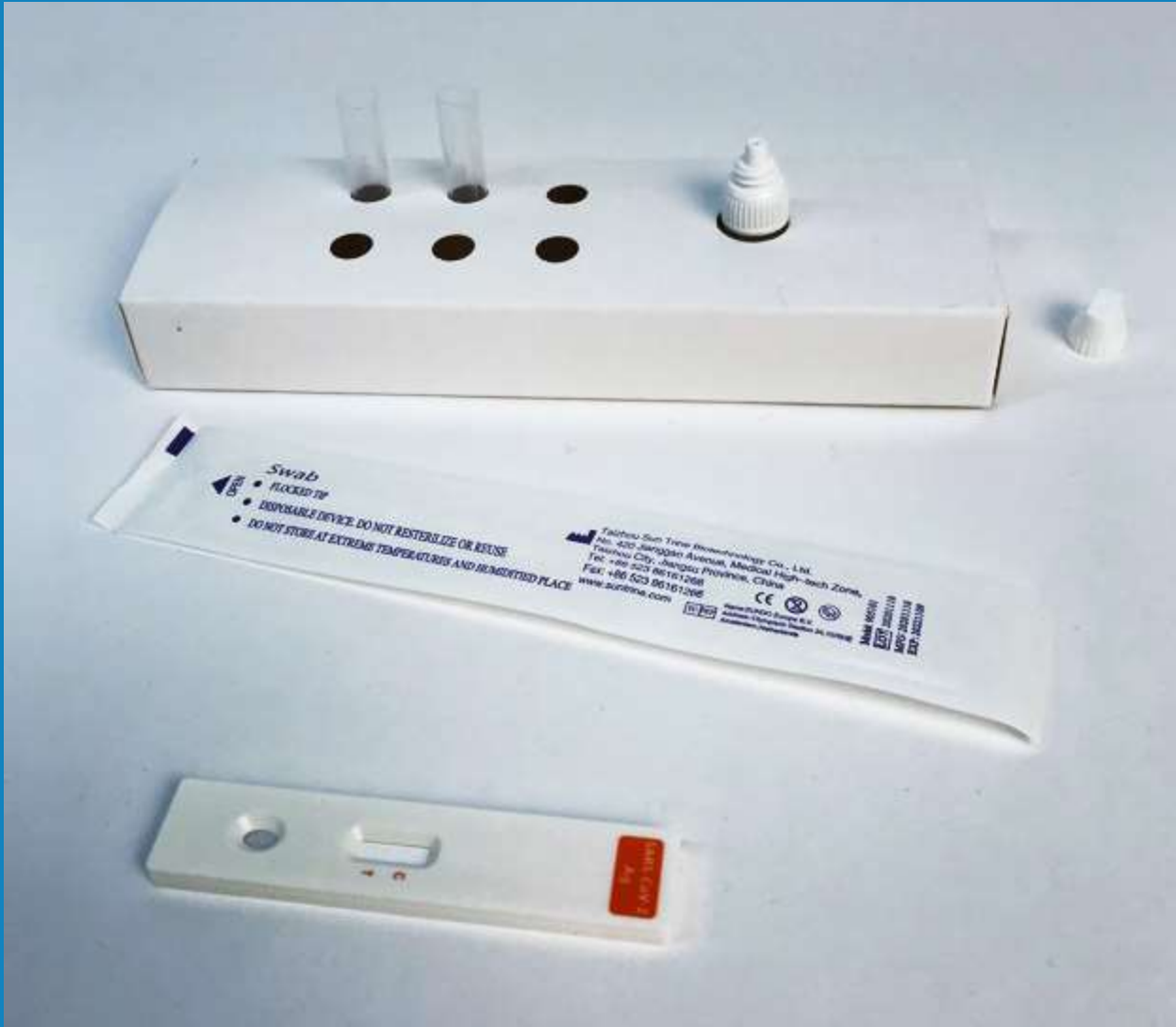

The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Der NP Tupfer (swab) ist gebrauchsfertig.

Der Karton, in dem sich die Tupfer befinden, kann auch als Ablage (Rack) verwendet werden.



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Der Tupfer wurde zur Probenahme verwendet.
Der Tupfer wurde im Röhrchen geschwenkt
und die Filterkappe aufgesetzt.

Das Röhrchen wird dann umgedreht und
man gibt drei Tropfen in die Testkassette.



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Nach der Zugabe von 3 Tropfen in die Kassette wartet man 15 Minuten.

Das erste Bild zeigt die Kassette nach 1 Minute, in der die Probe über den Teststreifen gezogen wird.

Nach 15 Minuten wird die Testkassette mit der UV-Taschenlampe beleuchtet.



Die Kontrollbande erscheint als rot-orangefarbenes Streifen im Sichtfenster der Testkassette beim „C“. (= Test korrekt). Wenn ein weiterer streifen am "T" aufleuchtet, ist der Test positiv.



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Die UV-Taschenlampe. (365nm)

Man muss AA Batterie(n) hinzufügen.

Die UV-Taschenlampe muss separat erworben werden. In einigen Märkten und bei größeren BESTELLUNGEN wird die UV-Taschenlampe mitgeliefert.



the fast lane to the European IVD market

Info/Bestellungen Test Kits:



info@dialane.org
<https://dialane.org>



+41 81 250 7738

© 2020 Dialane AG.

Dialane AG, Löslweg 2, 7012 Felsberg, Switzerland+41 81 250 7738