

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit


(immuno-fluorescence)

Doble aplicación en 1 para:

- Suero
- Extracto Nasofaringeal (Hisopo)



the fast lane to the European IVD market

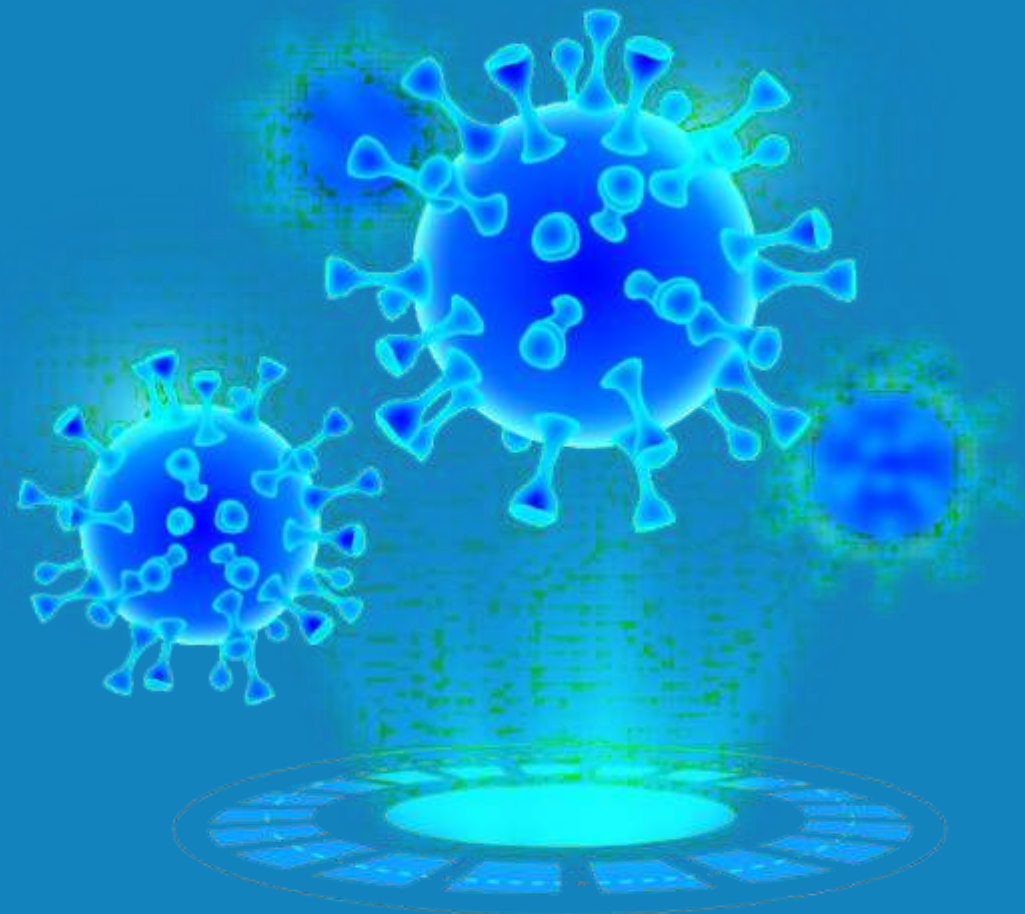



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Con aplicación para:

- Suero
- Extracto Nasofaringeal (Hisopo)



The SARS-CoV- 2 Antigen Rapid Test Kit

El kit contiene todo el material para
la extracción de muestra nasofaringeal


- Hisopos estériles
- Tubos de extracción (pipetas)
- Tapas de filtro
- Frascos buffer
- Casetes de prueba



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

El kit contiene todo el material para
la extracción de muestra nasofaringeal

- 25 Hisopos estériles
- 25 Tubos de extracción (pipetas)
- 25 Tapas de filtro
- 2 Frascos buffer
- 25 Casetes de prueba
- 1 Instrucciones de uso

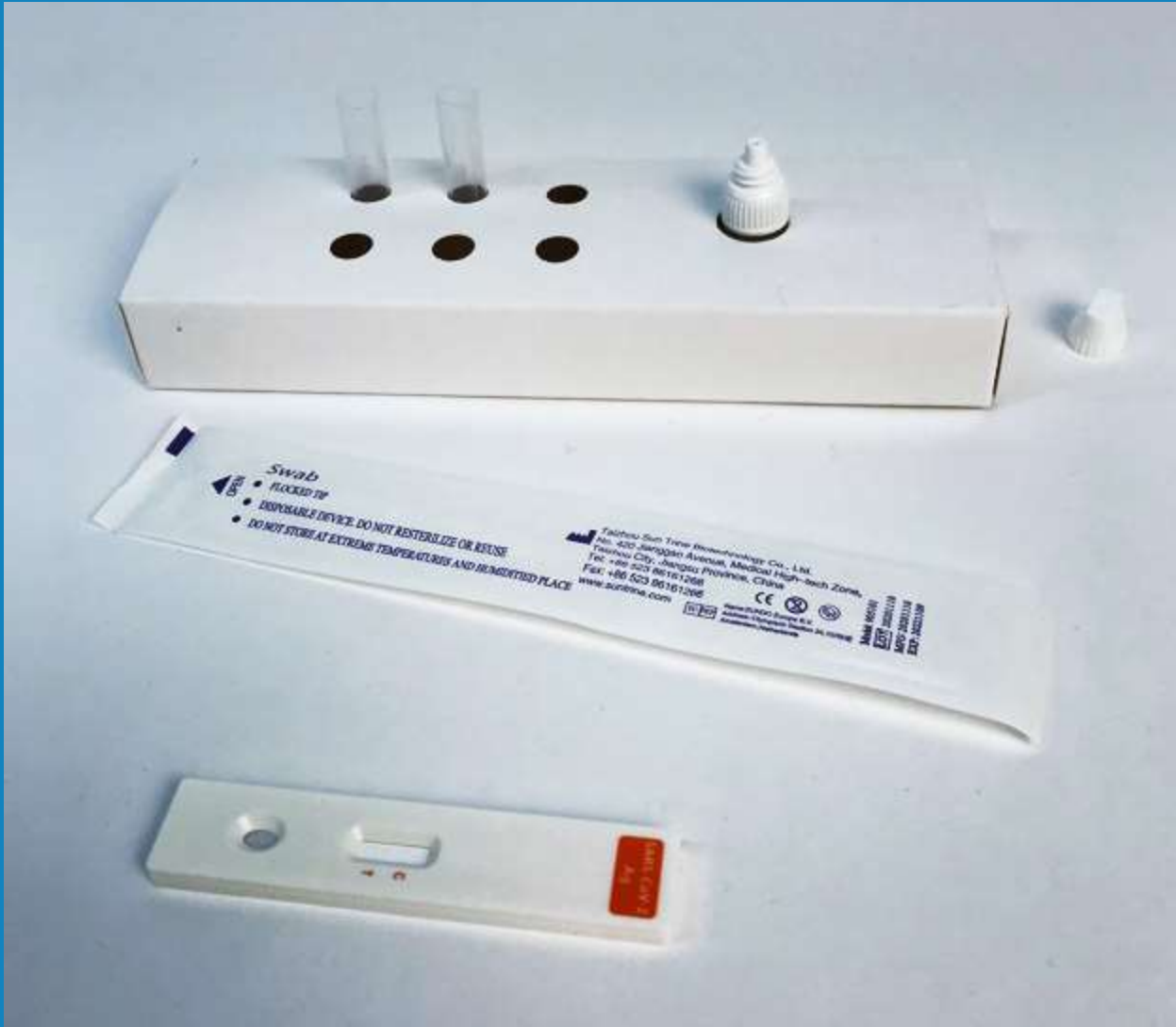

The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

El Hisopo NP esta listo para ser usado.

La caja de cartón que contiene los hisopos, también puede ser usada como soporte.



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

El hisopo se ha utilizado para recoger la muestra. El hisopo se giró y apretó en el tubo y se añadió la tapa del filtro.

El tubo se invierte y el se añaden 3 gotas en el casete de prueba.



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Después de añadir 3 gotas en el casete se debe esperar durante 15 minutos.

La primera imagen muestra el casete después de 1 minuto mostrando que la muestra está llenando la tira de prueba.



Después de 15 minutos el casete de prueba se ilumina con la linterna UV.

La banda de control aparece como una raya roja-naranja en la ventana de inspección del casete de prueba en la “C”. (= Test correcto).

Si se ilumina otra raya en la “T” entonces el Test es positivo.



The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Linterna de luz UV. (365nm)

Se deben añadir pila(s) AA.

La linterna de luz UV debe ser comprada por separado. En algunos mercados la linterna se suministra gratuitamente en base a grandes PEDIDOS.



the fast lane to the European IVD market

Info/Pedidos Test Kits:



info@dialane.org
<https://dialane.org>



+41 81 250 7738

© 2020 Dialane AG.

Dialane AG, Löslweg 2, 7012 Felsberg, Switzerland+41 81 250 7738